

# Perfectsmile behandelunit protocol

- 15 Behandelunit XO
- 16 Behandelunit + afzuiger bleken

# Protocol 15 Behandelunit XO

*Zie ook protocol 8*

## 15.1 Aanvang dag

- Haal afzuiger filters en kapjes vanaf schone kant van de sterilisatieruimte;
- Plaats afzuiger filters in de opening van de unit en kapjes op de afzuigerslangen;
- Controleer aan linker zijkant, zesde schuif: inhoud flacon met XO Water Clean. Wanneer deze leeg is, dan vervang je de flacon met een nieuwe uit de onderste plank van de witte kast;
- Controleer aan linker zijkant, vijfde schuif: inhoud fles met XO Suction Disinfection. Wanneer deze leeg is, dan vervang je de flacon met een nieuwe uit de onderste plank van de witte kast;
- Controleer of de slangen zijn verbonden aan de reinigingshouder;
- Schakel de unit in met de groene knop aan de achterzijde;
- De slangen worden doorgespoeld en gedesinfecteerd gedurende 6 minuten (zie display);
- Het display geeft "FLUSH OK" aan, het proces is afgerond;
- Neem de afzuigers uit de houder en druk op de zwarte knop achter de vierde schuif;
- Plaats de slang op de reinigingstoevoer;
- Druk nogmaals op de zwarte knop;
- Het reinigingsproces vangt nu aan en duurt circa 6 minuten;
- Zodra het display aangeeft "SUCTION OK" is het proces afgerond;
- De Unit is nu gebruiksklaar, zie protocol 7 voor verdere instructie.

## 15.2 Einde dag

*Zie ook pagina 8 van de XO manual (onderste plank van de witte kast).*

- Neem de afzuigers uit de houder en druk op de zwarte knop achter de vierde schuif;
- Verwijder de kapjes van de afzuigers;
- Plaats de slang op de reinigingstoevoer;
- Druk nogmaals op de zwarte knop;
- Het reinigingsproces vangt nu aan en duurt circa 6 minuten;
- Lever de afzuiger kapjes in bij de vuile kant sterilisatieruimte;
- Zodra het display aangeeft "SUCTION OK" is het proces afgerond.

*Zie ook pagina 10 van de XO manual.*

- Verwijder de afzuiger filters uit de opening in unit;
- Controleer filters en slangen afzuigers op zichtbaar vuil en verwijder dit;
- Lever de filters in bij de vuile kant sterilisatieruimte;

*Zie ook pagina 7 van de XO manual.*

- Pak de ronde reinigingshouder van de onderste plank in de witte kast;
- Plaats de reinigingshouder op de de glazen spoelbak van de unit;
- Plaats de wateraanvoerende slagen in de houders van de reinigingshouder;
- Verbind het transparante slangetje aan het metalen kraantje van de bekervuller;
- Druk op de linkerknop naast de bekerhouder;
- Wacht drie minuten, het display geeft de resterende tijd aan;
- Schakel de unit uit, de slangen blijven geplaatst op de reinigingshouder.

**Technische Dienst: 078 - 654 3737 (Dentalair)**

# Protocol 16 Behandelunit + afzuiger bleken

## 16.1 Aanvang dag

### *Behandelunit*

- Vul de waterreservoirs met koud kraanwater en 1 dopje Alpron (*Alpron zorgt voor reductie van algengroei in het gesloten watersysteem*);
- Plaats de waterreservoirs achterin de unit en draai de grijze schroefdop erop;
- De unit is nu gebruiksklaar, zie protocol 7 voor verdere instructie.

### *Afzuiger*

- Haal afzuiger filters en kapjes vanaf schone kant van de sterilisatieruimte;
- Plaats de filters en afzuigerkapjes;
- Plaats de witte reservoirbeker in de zijkant van de afzuiger;
- Sluit het deurje aan de zijkant van de afzuiger (*de afzuiger gaat niet aan zodra het deurje geopend is*);
- Schakel de afzuiger in met de groene knop aan de zijkant bovenop.
- Afzuiger is gebruiksklaar.

## 16.2 Einde dag

### *Behandelunit*

- Verwijder de metalen behuizing van de meerkantjespuit en lever in aan de vuile kant van de sterilisatieruimte;
- Controleer het binnenwerk van de meerkantjespuit op vervuiling en slijtage;
- Open het deurje achteraan de unit;
- Verwijder de waterreservoirs en breng ze naar de vuile kant van de sterilisatieruimte;
- Laat het deurje achteraan de unit open.

### *Afzuiger*

- Vul de gele Orotol fles met 1 dopje Orotol en rest water;
- Spoel de afzuigerslangen schoon;
- Verwijder het filter achter het grijze blok met daarop de afzuigerslangen;
- Lever het filter in bij de vuile kant van de sterilisatieruimte;
- Open het deurje aan de zijkant van de afzuiger;
- Verwijder de witte reservoirfles met speeksel;
- Leeg de reservoirfles en lever in bij de vuile kant van de sterilisatieruimte;
- Laat het deurje van de afzuiger openstaan.

**Technische Dienst: 030 - 603 6324 (Dental International)**